



Doküman No: FTR-GT08

Yürürlük Tarihi: 5.6.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

PARAFİN CİHAZI KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
25.10.2005	İçerik Değişikliği Yapıldı	1
02.01.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	2

HAZIRLAYAN: Özlem ÖNER

Fizyoterapist

İMZA

HAZIRLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA

PARAFİN CİHAZI KULLANIM TALİMATI

- 1. AMAÇ:** Parafin cihazını doğru bir şekilde kullanmak
- 2. KAPSAM:** Tüm fizyoterapistleri kapsar.
- 3. UYGULAMA:**
 - 3.1.** Alet içerisine top parafin konulur.
 - 3.2.** Alet fişe takılır
 - 3.3.** Uygulama yapmadan önce hasta ellerini sabunlu su ile yıkar ve kurular
 - 3.4.** Deride açık yara varsa vazalinle kapatılır.
 - 3.5.** Hasta tedavi edilecek elini parafine daldırıp çıkarır.
 - 3.6.** Parafin kuruduktan sonra üzerine naylon torba sarılır. Bunun üzerine tek kat havlu sarılır.
 - 3.7.** 15 dakika uygulama yapılır.
 - 3.8.** Tedavinin sonunda parafin elden temizlenir ve kap içerisindeki parafine ilave edilir.