



Doküman No: FTR-GT09

Yürürlük Tarihi: 25.10.2005

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

COLD PACK CİHAZI KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
02.01.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	1

HAZIRLAYAN: Fadime KIRBAŞ

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA

COLD PACK CİHAZI KULLANIM TALİMATI

- 1. AMAÇ:** Cold pack ısı ajanını doğru bir şekilde kullanmak.
- 2. KAPSAM:** Tüm fizyoterapistleri kapsar.
- 3. UYGULAMA:**
 - 3.1.** Buzluktan cold pack çıkartılır.
 - 3.2.** Tek kat ıslak havlu içerisine yerleştirilir.
 - 3.3.** Hastanın uygulama yapılacak tedavi bölgesine yerleştirilir.
 - 3.4.** 15 dakika uygulama yapılır.
 - 3.5.** Uygulama sonunda cold pack buzluğa yerleştirilir.