



Doküman No: FTR-GT26

Yürürlük Tarihi: 02.01.2014

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi: -

BODY COMPOSITION ANALYZER GENIUS-220 CİHAZI KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Fadime KIRBAŞ

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT26

Yürürlük Tarihi: 02.01.2014

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi: -

BODY COMPOSITION ANALYZER GENIUS-220 CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ: Body Composition Analyzer Genius-220 cihazını doğru bir şekilde kullanmak.

2. KAPSAM: Tüm fizyoterapistleri kapsar.

3. UYGULAMA

3.1. Cihazın ön-alt tarafındaki on-off düğmesinden cihaz açılır.

3.2. Analiz yapılacak kişi cihazın üzerindeki sensörler üzerine basar.

3.3. Cihaz kişinin ağırlığını gösterir.

3.4. Cihazın ön-yan panelindeki tuşlar kullanılarak kişinin boy uzunluğu ve yaşı girilir.

3.5. Next tuşu kullanılarak cinsiyet girilir.

3.6. El tutma yerindeki sensörler kavranıp ileri doğru itilir.

3.7. Analiz yapılır.