



Doküman No: KBB-GT02

Yürürlük Tarihi: 11.02.2013

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

KBB ÜNİTESİ KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Betül GÜLBULAK

Kulak Burun Boğaz Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: KBB-GT02

Yürürlük Tarihi: 11.02.2013

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

KBB ÜNİTESİ KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ: KBB biriminde bulunan Collin 3000 markalı KBB ünitesinin tüm çalışanlar için kullanılmasına yönelik yöntem belirlemektedir.

2. KAPSAM: Tüm SRM-KBB birimi çalışanlarını kapsar.

3. UYGULAMA: KBB birimi çalışanları, KBB ünitesinin çalışmasını aşağıdaki talimat doğrultusunda yapar.

3.1. KBB ünitesinin ön yüz – sol üst köşesindeki panelin en solundaki on-off düğmesinden alet çalışmaya başlar.

3.2. Aspiratör hortumu kullanılarak vakum işlemi yapılabilmesi için hortum yerinden kaldırılır.

3.3. Zaman ayarı için “timer” düğmesi kullanılır.

3.4. Kalorik test için suyun sıcaklığını ayarlama “temp. select” düğmesi kullanılır. En soldaki su veren hortum, test için kullanılır.

3.5. Pulverizatör olarak soldan ikinci hortum kullanılır.

3.6. Koterizasyon işlemi için ön panelde bulunan kısım kullanılır. Bu panelde, koterizasyonun ısı derecesi ayarı yapılır.

3.7. KBB ünitesinin sağ yan kısmında, soğuk ışık kaynağı vardır. Üstündeki yeşil düğme I pozisyonuna getirilince çalışır ve ışık şiddeti, ayar düğmesi ile ayarlanır.

3.8. Ünitenin siyah renkli ön panelinin kapağı hafif bastırılınca açılır. Yukarı-ıçe doğru hareketle kapak tamamen açılır. Bu kısımda, KBB muayene malzemelerini koymak için bölümler vardır.

3.9. Ünitenin beyaz ön-alt kısmında iki adet kapaklı kısım vardır. Buralardaki sepetlere KBB malzemeleri konur.

3.10. Ünitenin beyaz renkli ön-alt bölümünde aspiratör şişesinin bulunduğu kısım vardır ve şişedeki tıbbi atıkların boşaltılması için kapak aşağıya doğru bastırılarak açılır. Aynı şekilde yerine takılır.