



Doküman No: LAB-GT17

Yürürlük Tarihi: 4.7.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 17.11.2014

ALERJİ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
05.10.2005	Yönetim Değişikliği	1
17.11.2014	Yapıldı	2
	Yönetim Değişikliği	
	Yapıldı	

HAZIRLAYAN: Esen BOSTANCI

Biyolog

İMZA

ONAYLAYAN: Nusret TAHERİ

Başhekim

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA

ALERJİ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ: Alerji cihazını doğru bir şekilde kullanmak.

2. KAPSAM: Tüm laboratuvar çalışanlarını kapsar.

3. UYGULAMA:

POWER	OPEN/CLOSE	MENÜ	ENTER	UP	DOWN
-------	------------	------	-------	----	------

3.1. Cihaz power tuşu ile açılır.

3.2. Open tuşuna basılır ve cihaza maspet tepsisi yerleştirilir.

3.3. Close tuşuna basılır ve maspet tepsisini içine alır.

3.4. All panel correct yazısı görünür.

3.5. Ne kadar hasta çalışılacak ise up ve down tuşu ile seçilir.

3.6. Çalışılan maspetler için turkish 36 parametresi seçilir.

3.7. Eğer hasta çalışılmayacaksa position empty parametresi seçilir.

3.8. Enter tuşuna basılır ve cihaz okumaya başlar.

3.9. Sonuçlar printer'dan çıktıktan sonra close tuşuna basılır.

3.10. İçindeki masperler çıkartılır.

3.11. Power tuşu ile cihaz kapatılır.