



Doküman No: LAB-GT24

Yürürlük Tarihi: 17.11.2014

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

DADE BEHRİNG NEPHOLEMETER 200 KULLANICI PROGRAMI TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Esen BOSTANCI

Biyolog

İMZA

ONAYLAYAN: Nusret TAHERİ

Başhekim

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA

DADE BEHRİNG NEPHOLEMETER 200 KULLANICI PROGRAMI TALİMATI

1. AMAÇ: Behring nepholemeter 200 kullanıcı programı cihazını doğru bir şekilde kullanmak.

2. KAPSAM: Tüm laboratuvar çalışanlarını kapsar.

3. UYGULAMA:

3.1. SİSTEMİN AÇILIŞI

3.1.1. Sistemin distile suyu, Dilüent ve Buffar miktarı kontrol edilir.

3.1.2. Atık kabı boşaltılır.

3.1.3. Analizör, bilgisayar ve moütör sırası ile açılır.

3.1.4. Açılan ekran üzerinde BNII aliase ikonuna çift tıklanır.

3.1.5. Ekrana gelen login/logout şemasında user-admin seçilir.

3.1.6. Bağlantı kurulduktan sonra dilüsyon kapları şeması gelir.

3.1.7. Change dilution strips ikonuna basılır. Dilüsyon kapları değiştirilir. OK ekranına basılarak ekrandan çıkılır.

3.2. REAKTİFLER:

3.2.1. Buzdolabında bulunan reaktifler oda sıcaklığına getirilir.

3.2.2. 3-4-5 nolu reaktif kaplarına reaktifler kapakları çıkartılarak racklara yerleştirilir.

3.2.3. Cihazın 3-4-5 nolu kanallarına rack yüklemesi yapılır.

3.3. KONTROL ÇALIŞMASI:

3.3.1. Bar bölümünden rutine seçilir.

3.3.2. Control Request bölümüne basılır.

3.3.3. Çalışmak istenen test ve çalışılmak istenen kontrol seçilir.

3.3.4. Measure ikonuna basılır.

3.3.5. Çalışılan kontroller Control Journal sayfasından izlenir.

3.3.6. Sistemden Shut Down'a basılarak bilgisayar kapatılır.

3.3.7. Cihazın düğmesi kapatılır.

3.4. HASTA ÇALIŞILMASI:

3.4.1. Kullanıma hazır hale gelmiş olan barkotlu kan tüpleri çalışma racklarına barkodları görülecek şekilde cihaza yerleştirilir.

3.4.2. Çalışılan test sonuçları LAB Journal sayfasından takip edilir.

DADE BEHRİNG NEPHOLEMETER 200 KULLANICI PROGRAMI TALİMATI

3.4.3. Yüksek çıkan sonuçlar için Action çalışılacak olan testin üzerine tıklanır. Action butonundan repeat seçilir. Dilütion seçilip oneasure basılarak ekrandan çıkılır.

3.4.4. Lab Journual sayfasından √ ikonuna basılarak cihazda çalışılmış sonuçlar otomasyon programına gönderilir.

3.5. SİSTEMİN KAPATILMASI:

3.5.1. File barının altında bulunan QUIT bölümü seçilir.

3.5.2. Perform tuşuna basılır.

3.5.3. Açılan result documentation ekranında close seçilir.

3.5.4. QUIT the program ekranında kendisinin çıkması beklenir.