



Doküman No: MÜD-GT17

Yürürlük Tarihi: 24.07.2001

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 07.03.2014

MARTIN ME ELEKTROKOTER KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
25.10.2005	İçerik Değişikliği Yapıldı	1
07.03.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	2

HAZIRLAYAN: Sevda YÜCEL

Müdahale Odası Hemşiresi

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA

MARTIN ME ELEKTROKOTER KULLANIM TALİMATI

1.AMAÇ: Bu talimat, müdahale odasında yapılan tüm cerrahi girişimlerde kanama kontrolü yapmak ve ciltteki oluşumları elektrik akımı ile yakmak amacı ile kullanılan Martin ME 200 Elektrokoter cihazının doğru bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır.

2. KAPSAM: Bu talimat müdahale odası hemşirelerini kapsar

3. UYGULAMA:

- 3.1.** Elektrokoter 220 volt şebeke elektriği ile çalışmaktadır.,
- 3.2.** Cihazın ana açma-kapama butonu cihazın arka bölümündedir STAND BY konumu ise ön bölümündedir. Cihazın uzun süre çalışmama durumunda ana çama-kapama butonu ile kapatılması tavsiye edilir.
- 3.3.** Cihaz kesme, coagulasyon, bi-coagulasyon, sprej coagulasyon ve kontak coagulasyon yapar. Ayrıca, mikro ve makro modda çalışabilir. Mikro modda çalıştırmak için butona basmak yeterlidir.
- 3.4.** Cihaz elden veya ayaktan kumanda edilebilir. Kullanıcı hangi modda çalışmak isterse cihaz üzerinde bulunan el veya ayak pedalı işaretli butona basmak suretiyle seçilmiş modu kullanabilir.
- 3.5.** Cihazın makro modda maksimum çıkış güçleri şu şekildedir.

MAKRO MOD:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| ▪ Sprej Coagulasyon | 100 watt 500 ohm |
| ▪ Contact-cutting 1-2-3-4 | 175 watt 300 ohm |
| ▪ Bipolar coagulasyon | 70 watt 100 ohm |

MİKRO MOD:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| ▪ Sprej coagulasyon | 35 watt 300 ohm |
| ▪ Contact- cutting 1-2-3-4 | 60 watt 500 ohm |
| ▪ Bipolar coagulasyon | 20 watt 100 ohm |

3.6. Monopolar ve bipolar çalışmalar için cihazın ön panelinde ayrı ayrı bağlantı yerleri mevcuttur. Aynı anda iki cerrahın çalışmasına imkan sağlamaktadır. Monopolar ve bipolar ayak pedalı giriş yerleri ayrıdır.

3.7. Notr plaka giriş soketi ikaz lambası, notr plakanın hasta ile teması tam olarak algılandığı zaman ikaz lambası söner ve cihaz kullanıma hazır duruma gelir.