



Doküman No: MÜD-GT22

Yürürlük Tarihi: 12.10.2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

NÜVE OT 23 B BUHARLI OTOKLAV CİHAZI KULLANIM
TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: SEVDA YÜCEL

Hemşire

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: MÜD-GT22

Yürürlük Tarihi: 12.10.2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

NÜVE OT 23 B BUHARLI OTOKLAV CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı otoklav cihazını doğru bir şekilde kullanmak

2. KAPSAM : Bu talimat Müdahale hemşirelerini kapsar.

3. UYGULAMA

3.1.Cihazın ön yüzünde sterilizasyon odasının kapağı cihazın çalışmasıyla ilgili ayarların ve seçimlerin yapıldığı bir LC display ve dört kontrol butonundan oluşan kontrol paneli vardır ayrıca alt kısmında depo haznesi boşaltma konektörü,atık haznesi,boşaltma konektörü,açma /kapama anahtarı,yazıcı portu ve sigortaları vardır.Cihazın üst kısmında ise su tankının kapağı mevcuttur.

Cihaza su tankının kapağı açılarak su seviyesi maximum göstergesine gelene kadar distile su konulur.

3.2 Cihaz topraklı bir fişe takılır.

3.3. Steril edilecek malzeme sterilizasyon bölmesine yerleştirilir.

3.4 Ön alt bölümdeki açma/kapama anahtarına basılır.

3.5. Kumanda ve gösterge panelinin çalışır duruma geldiği izlenir.

3.6.Cihaz sterilizasyon ısını ve zamanlarını elektronik panelde gösterir.

3.7.Cihazın kapısı kapatılıp başla tuşunun altındaki f4 butonuna basılır.

3.8. Sterilizasyon işlemi bitince cihaz uyarı verir.Cihazın kapısı açılır kapak içindeki plastik conta silinerek temizlenir.

3.9.Cihaz açma/kapama anahtarından kapatılır.