



Doküman No: DİS-GT02

Yürürlük Tarihi: 12.10.2000

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 25.10.2005

## DİŞ ÜNİTİ KULLANMA TALİMATI (KAVO SYSTEMİCA DİŞ ÜNİTİ İÇİN)

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
25.10.2005	İçerik Değişikliği Yapıldı	1

HAZIRLAYAN: Murat ÖZLER

Diş Ünitesi Birim Amiri

İMZA

ONAYLAYAN: Emine ÇELİK

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: DİS-GT02

Yürürlük Tarihi: 12.10.2000

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 25.10.2005

## DİŞ ÜNİTİ KULLANMA TALİMATI (KAVO SYSTEMİCA DİŞ ÜNİTİ İÇİN)

- 1. AMAÇ:** Diş ve ağız hastalıklarının muayenesini ve gerekli tedavilerinin yapılmasını sağlayan cihaz
- 2. KAPSAM:** Tüm Dişhekimleri ve teknisyenleri.
- 3. UYGULAMA:**
  - 3.1.** Cihazın sol alt tarafındaki cihazın yeşil açma-kapama düğmesi "1" konumuna getirilerek çalıştırılır.
  - 3.2.** İş bitiminde "0" konumuna getirilerek kapatılır.
  - 3.3.** Cihaz üzerinde ki başlıklar günlük olarak üretici firmanın tavsiye ettiği yağlar ile yağlanır.
  - 3.4.** Ünit hava ve su giriş vanaları sabahları açılır, iş bitiminde kapatılır.
  - 3.5.** Arıza olduğunda birim sorumlusuna haber verilir.