



Doküman No: DİS-GT03

Yürürlük Tarihi: 12.10.2000

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 25.10.2005

KOMPRESÖR KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
25.10.2005	İçerik Değişikliği Yapıldı	1

HAZIRLAYAN: Murat ÖZLER

Diş Ünitesi Birim Amiri

İMZA

ONAYLAYAN: Emine ÇELİK

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: DİS-GT03

Yürürlük Tarihi: 12.10.2000

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 25.10.2005

KOMPRESÖR KULLANMA TALİMATI

- 1. AMAÇ:** Kompresör odasında bulunan ve dış ünitelerinin hava ihtiyacını karşılayacak olan 4 adet kompresörün düzgün ve randımanlı çalışmasını sağlamak.
- 2. KAPSAM:** Tüm Dişhekimleri ve teknisyenleri.
- 3. UYGULAMA:**
 - 3.1.** Hergün sabah Birimdeki ana çalıştırma anahtarı açılarak kompresörler çalıştırılır. Akşam iş bitiminde anahtar kapatılarak kompresörler durdurulur.
 - 3.2.** Sorumlu hekiminde bulunan anahtar ile kompresör odasının kapısı açılır, iş bitiminde kapı kilitlenir ve anahtar iade edilir.
 - 3.3.** Her hafta sonu kompresörler kapatılarak, hava tahliye muslukları açılır ve depolardaki su ve hava tahliye edilir. Depolar tamamen boşalınca musluklar kapatılır.
 - 3.4.** Kompresör üzerindeki hava çıkış muslukları her zaman açık olacak, hiçbir zaman kapatılmayacaktır.
 - 3.5.** Arıza olduğunda birim sorumlusuna haber verilir