



Doküman No: DİS-GT04

Yürürlük Tarihi: 12.10.2000

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 25.10.2005

AMALGAMATÖR KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
1	İçerik değişikliği yapıldı	1

HAZIRLAYAN: Murat ÖZLER

Diş Ünitesi Birim Amiri

İMZA

ONAYLAYAN: Emine ÇELİK

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: DİS-GT04

Yürürlük Tarihi: 12.10.2000

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 25.10.2005

AMALGAMATÖR KULLANMA TALİMATI

- 1. AMAÇ:** Amalgam dolgu malzemesini hazırlamak.
- 2. KAPSAM:** Tüm Dişhekimleri ve teknisyenleri.
- 3. UYGULAMA:**
 - 3.1.** Cihazın üst kapağı açılır. Civa kutusuna civa, gümüş tozu kutusuna konulup kapatılır.
 - 3.2.** Cihaz, sağ yan tarafındaki +,- işaretlerine göre oran ayarı yapılır.
 - 3.3.** Ön taraftaki zaman ayarı 25'e getirilir. Dolgu haznesi kontrol edilir.
 - 3.4.** Start düğmesine basılır, aynı zamanda sol taraftaki kol dolgu sayısı kadar çevrilir. Zaman bitiminde cihaz durur. Dolgu haznesi açılıp malzeme alınır.
 - 3.5.** İş bitiminde cihaz kapatılır.
 - 3.6.** Arıza olduğunda birim sorumlusuna haber verilir.