



Doküman No: DİS-GT05

Yürürlük Tarihi: 12.10.2000

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 25.10.2005

DİŞ ÜNİTİ KULLANMA TALİMATI (CASTELLINI DİŞ UNİTİ İÇİN)

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
25.10.2005	İçerik Değişikliği Yapıldı	1

HAZIRLAYAN: Murat ÖZLER

Diş Hekimi

İMZA

ONAYLAYAN: Emine ÇELİK

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: DİS-GT05

Yürürlük Tarihi: 12.10.2000

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 25.10.2005

DİŞ ÜNİTİ KULLANMA TALİMATI (CASTELLINI DİŞ UNİTİ İÇİN)

- 1. AMAÇ:** Diş ve ağız hastalıklarının muayenesini ve gerekli tedavilerinin yapılmasını sağlayan cihaz
- 2. KAPSAM:** Tüm Dişhekimleri ve teknisyenleri.
- 3. UYGULAMA:**
 - 3.1.** Cihazın sağ alt tarafındaki cihazın açma-kapama düğmesi "1" konumuna getirilerek çalıştırılır.
 - 3.2.** İş bitiminde "0" konumuna getirilerek kapatılır.
 - 3.3.** Cihaz üzerinde ki başlıklar günlük olarak üretici firmanın tavsiye ettiği yağlar ile yağlanır.
 - 3.4.** Ünit hava ve su giriş vanaları sabahları açılır, iş bitiminde kapatılır.
 - 3.5.** Arıza olduğunda klinik birim sorumlusuna haber verilir.