



Doküman No: DİS-GT07

Yürürlük Tarihi: 12.10.2000

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 25.10.2005

OTOKLAV KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

| Değişiklik Tarihi | Açıklama | Değişiklik No |
|-------------------|----------------------------|---------------|
| - | Yeni yayımlandı | 0 |
| 25.10.2005 | İçerik Değişikliği Yapıldı | 1 |

HAZIRLAYAN: Murat ÖZLER

Diş Ünitesi Birim Amiri

İMZA

ONAYLAYAN: Emine ÇELİK

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: DİS-GT07

Yürürlük Tarihi: 12.10.2000

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 25.10.2005

OTOKLAV KULLANMA TALİMATI

- 1. AMAÇ:** Kullanılan bütün el aletlerinin sterilizasyonunu sağlamak.
- 2. KAPSAM:** Tüm diş hekimleri ve teknisyenleri.
- 3. UYGULAMA:**
 - 3.1.** Net/Power düğmesine basılır.
 - 3.2.** Saf su tankındaki su kontrol edilir. Suyun min. seviyesinin altında olmamalıdır,
gerekli ise saf su ilave edilir.
 - 3.3.** Atık su tankı kontrol edilir. Gerekli ise fazla su boşaltılır.
 - 3.4.** Sterilize edilecek aletler sterilizatörün içine konulur. Kapağı kapatılır.
 - 3.5.** Gösterge ekranının sağındaki veya solundaki tuştan “hızlı” veya “normal” sterilizasyon seçimi yapılır.
 - 3.6.** Sterilizasyon otomatik olarak başlayacaktır.
 - 3.7.** “Sterilizasyon OK” yazısı görülünce aletler alınır.
 - 3.8.** İş bitiminde cihaz kapatılır.
 - 3.9.** Arıza olduğunda klinik birim sorumlusuna haber verilir.