



Doküman No: FTR-GT01

Yürürlük Tarihi: 29.11.2007

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

## PHYACTION U ULTRASON CİHAZI KULLANIM TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
02.01.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	1

HAZIRLAYAN: Fadime KIRBAŞ

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT01

Yürürlük Tarihi: 29.11.2007

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

## PHYACTION U ULTRASON CİHAZI KULLANIM TALİMATI

**1. AMAÇ:** Phyaction U ultrason cihazını doğru bir şekilde kullanmak.

**2. KAPSAM:** Tüm fizyoterapistleri kapsar.

### **3. UYGULAMA**

**3.1.** Cihazın arka tarafındaki 0-1 düğmesinden cihaz açılır.

**3.2.** Küçük başlık kullanılacaksa 2 nolu düğmeye basılır.

**3.3.** Cihazın ön gösterge panelinden 3 nolu düğmeye basılarak frekans ayarlanır.

**3.4.** Cihazın ön gösterge panelinden 4 nolu düğmeye basılarak uygulanacak modalite seçilir. (Kesikli - düz)

**3.5.** Cihazın ön alt tarafındaki yuvarlak düğme çevrilerek dozaj ayarlanır.

**3.6.** Uygulamaya başlanır.

**3.7.** Uygulama bitince cihaz sesli sinyal verecektir. Arkadaki 0-1 düğmesinden cihaz kapatılır.