



Doküman No: FTR-GT02

Yürürlük Tarihi: 28.01.2010

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

EV- 507 TENS CİHAZI KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Fadime KIRBAŞ

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT02

Yürürlük Tarihi: 28.01.2010

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

EV- 507 TENS CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1.AMAÇ: EV-507 TENS Cihazını doğru bir şekilde kullanmak

2.KAPSAM: Tüm fizyoterapistleri kapsar.

3.UYGULAMA:

3.1. Elektrotlar uygulama bölgesine yerleştirilir.

3.2. Cihazın yanındaki ON-OFF düğmesi ON konumuna getirilir.

3.3. Cihazın ön yüzündeki kapak açılır.TENS ya da EMS Programı seçilir.

3.4. Set düğmesine basılır.Gerekli ayarlamalar yapılır.

3.5. Cihazın üzerindeki düğmeler çevrilerek akımın dozajı ayarlanır.

3.6. Uygulama sonunda cihaz kapatılır.

3.7. Sonra elektrotlar çıkarılır.