



Doküman No: FTR-GT03

Yürürlük Tarihi: 5.6.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

## PAGANI ELEKTROTERAPİ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
25.10.2005	Yönetim Değişikliği	1
02.01.2014	Yapıldı	2
	Yönetim Değişikliği	
	Yapıldı	

HAZIRLAYAN: Özlem ÖNER

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT03

Yürürlük Tarihi: 5.6.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

## PAGANI ELEKTROTERAPİ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

**1.AMAÇ:** Pagani elektroterapi cihazını doğru bir şekilde kullanmak.

**2.KAPSAM:** Tüm fizyoterapistleri kapsar.

### **3.UYGULAMA:**

**3.1.** Cihazın arkasındaki on/off düğmesinden alet açılır.

**3.2.** Elektrotlar yerleştirilir.

**3.3.** Vakum ile uygulama yapılacaksa sağ yan taraftaki düğmeden alet açılır,vakum dozajı ayarlanır.

**3.4.** Uygulanacak modalite seçilir.

**3.5.** Süre ayarlanır.

**3.6.** Uygulama yapılır.

**3.7.** Uygulama bittiği zaman önce elektrotlar çıkartılır sonra cihaz kapatılır.