



Doküman No: FTR-GT04

Yürürlük Tarihi: 5.6.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

MYOMED 932 ELEKTROTERAPİ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

| Değişiklik Tarihi | Açıklama | Değişiklik No |
|-------------------|---------------------|---------------|
| - | Yeni yayımlandı | 0 |
| 25.10.2005 | Yönetim Değişikliği | 1 |
| 02.01.2014 | Yapıldı | 2 |
| | Yönetim Değişikliği | |
| | Yapıldı | |

HAZIRLAYAN: Özlem ÖNER

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kailte Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT04

Yürürlük Tarihi: 5.6.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

MYOMED 932 ELEKTROTERAPİ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1.AMAÇ:Myomed 932 Elektroterapi cihazını doğru bir şekilde kullanmak

2.KAPSAM: Tüm fizyoterapistleri kapsar.

3.UYGULAMA:

Bu cihaz, 'Vacatron' 590 vakum cihazı ' ile kullanılmaktadır.

- 3.1.** Cihazın üzerinde her iki yanda duran klipsler çekilerek ekran açılır.
- 3.2.** Sol yan taraftaki on/ off düğmesinden cihaz açılır.
- 3.3.** Vakum elektrotla uygulama yapılacaksa sol yandaki düğmeden vakum açılır.
- 3.4.** Vakumun çekiş gücü ortadaki büyük ayar düğmesinden ayarlanır.
Vakumun tipi (kesikli veya düz) çekiş gücünün ayarlandığı düğmenin sağındaki 3 düğmeden birine basılarak seçilir.
- 3.5.** Elektrotlar hastaya yerleştirildikten sonra akım ayarlamasına geçilmelidir.
- 3.6.** Ekran açıldıktan sonra ana menüden uygulanacak modalite seçilir.Bunun için cihazın ön panelinin ortasındaki yukarı ve aşağı okları kullanılır.Uygulama yapılacak akım seçildiği zaman cihaz üzerindeki 'Enter' tuşuna basılarak seçilen akımın alt menüsünün olduğu sayfaya girilir.Girilen sayfadan geri dönmek istenirse enter düğmesinin sol yanındaki düğmeye basılır. Verilen her komuttan sonra 'enter' düğmesine basılır.
- 3.7.** Süre, cihazın ortasındaki büyük daire şeklindeki ayar düğmesinden ayarlanır. Süre düğmesinin sağındaki küçük dairesel düğmelerin ilkinden birinci kanal dozajı, ikincisinden ikinci kanal dozajı ayarlanır.
- 3.8.** Uygulama bittiği zaman cihaz sinyal verir.Önce elektrotlar hastanın üzerinden çıkartılır.Vakum elektrotla uygulama yapıldıysa vakum çekme dozaj düğmesi '0' konumuna getirilerek vakum elektrotlar çıkartılır.Alet kapatılır.