



Doküman No: FTR-GT05

Yürürlük Tarihi: 5.6.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

SYSTEM 2000 TENS CİHAZI KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
25.10.2005	Yönetim Değişikliği	1
02.01.2014	Yapıldı	2
	Yönetim Değişikliği	
	Yapıldı	

HAZIRLAYAN: Özlem ÖNER

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT05

Yürürlük Tarihi: 5.6.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

SYSTEM 2000 TENS CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ: System 2000Tens cihazını doğru bir şekilde kullanmak.

2. KAPSAM: Tüm fizyoterapistleri kapsar.

3. UYGULAMA:

3.1. Cihazın pil gözü açılır.Soldaki düğmeden atım genişliği, sağdaki düğmeden akım frekansı, ortadaki düğmelerden ise modalitesi ayarlanır.

3.2. Elektrot yüzeylerine jel sürülerek uygulama bölgesine yerleştirilir.

3.3. Cihazın üst kısmında sağda ve solda olan düğmeler çevrilerek akım verilir, uygulama yapılır.Uygulama sonunda önce cihaz kapatılır. Sonra elektrotlar çıkartılır.