



Doküman No: FTR-GT06

Yürürlük Tarihi: 05.6.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

TRU- TRAK 401 TRAKSİYON CİHAZI KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
25.10.2005	İçerik Değişikliği Yapıldı	1
02.01.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	2

HAZIRLAYAN: Özlem ÖNER

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT06

Yürürlük Tarihi: 05.6.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

TRU- TRAK 401 TRAKSİYON CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1.AMAÇ:Tru-trak 401 traksiyon cihazını doğru kullanmak.

2.KAPSAM: Tüm fizyoterapistleri kapsar.

3.UYGULAMA:

- 3.1. Hasta cihaz üzerinde pozisyonlanır.
- 3.2. Sağ yandaki on/off düğmesinden alet açılır.
- 3.3. Emniyet düğmesine basılır.
- 3.4. Reset düğmesine basılır.
- 3.5. Program seçilir. Enter'a basılır.
- 3.6. Prog time ayarlanır. Enter'a basılır.
- 3.7. Reg time ayarlanır. Enter'a basılır.
- 3.8. Treat time ayarlanır. Enter'a basılır.
- 3.9. Hold time ayarlanır. Enter'a basılır.
- 3.10. Rest time ayarlanır. Enter'a basılır.
- 3.11. Max kg ayarlanır. Enter'a basılır.
- 3.12. Min kg ayarlanır. Enter'a basılır.
- 3.13. Verileri kayıt etmek için 1 nolu düğmeye basılır.
- 3.14. Emniyet düğmesi hastaya verilir.
- 3.15. Start düğmesine basılarak program başlatılır.