



Doküman No: FTR-GT07

Yürürlük Tarihi: 5.6.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

HOTPACK CİHAZI KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
25.10.2005	İçerik Değişikliği Yapıldı	1
02.01.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	2

HAZIRLAYAN: Özlem ÖNER

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT07

Yürürlük Tarihi: 5.6.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

HOTPACK CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. **AMAÇ:** Hotpack cihazını doğru bir şekilde kullanmak
2. **KAPSAM:** Tüm fizyoterapistleri kapsar.
3. **UYGULAMA:**
 - 3.1 Kazanın içi arıtılmış su ile doldurulur.
 - 3.2. On/off düğmesinden cihaz açılır.
 - 3.3. Suyun sıcaklığı 65 derece olacak şekilde termostat ayarlanır.
 - 3.4. Hotpackler suyun içerisine yerleştirilir.
 - 3.5. Su miktarı azaldıkça eklenir.
 - 3.6. Uygulama yapılacağı zaman kazandan hotpack çıkarılır.
 - 3.7. Hotpack 4 kat havlu içerisine sarılır.
 - 3.8. Hastanın uygulama yapılacak tedavi bölgesine yerleştirilir.
 - 3.9. 20 dakika uygulama yapılır.
 - 3.10. Uygulama sonunda hotpac kazanın içerisine konulur.