



Doküman No: FTR-GT10

Yürürlük Tarihi: 5.6.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

INFRARUJ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
25.10.2005	Yönetim Değişikliği	1
02.01.2014	Yapıldı	2
	Yönetim Değişikliği	
	Yapıldı	

HAZIRLAYAN: Özlem ÖNER

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT10

Yürürlük Tarihi: 5.6.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

INFRARUJ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1.AMAÇ: Infraruj cihazını doğru bir şekilde kullanmak.

2. KAPSAM: Tüm fizyoterapistleri kapsar.

3. UYGULAMA:

3.1. Cihazın yeri ve yüksekliği hastanın pozisyonuna göre ayarlanır.

3.2. Ön taraftaki kırmızı düğmeden cihaz açılır.

3.3. Üstteki daire şeklindeki düğme saat yönünde çevrilerek uygun süre ayarlanır.

3.4. Süre bittiğinde cihaz kapanır