



Doküman No: FTR-GT11

Yürürlük Tarihi: 5.6.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 01.02.2014

## BIODEX İZOKİNETİK SİSTEM CİHAZI KULLANIM TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
02.01.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	1

HAZIRLAYAN: Özlem ÖNER

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT11

Yürürlük Tarihi: 5.6.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 01.02.2014

## BIODEX İZOKİNETİK SİSTEM CİHAZI KULLANIM TALİMATI

**1.AMAÇ:** Biodex izokinetik sistem cihazını doğru bir şekilde kullanmak

**2. KAPSAM:** Tüm fizyoterapistleri kapsar.

**3.UYGULAMA:**

- 3.1. Cihaz panelin arkasındaki düğmeden açılır.
- 3.2. Panelin ön kısmındaki iki düğme aşağıdan yukarıya doğru açılır.
- 3.3. Bilgisayar açılır.
- 3.4. System 3 programı açılır
- 3.5. Hasta girişi yapılır.
- 3.6. Hasta koltuğa yerleştirilir
- 3.7. Dış bantlarla pozisyonu sabitlenir.
- 3.8. Uygulanacak program seçilir.
- 3.9. Eklem hareket açıklığı ayarlanır
- 3.10. Çalıştırılacak program başlatılır
- 3.11. Program bitince hafızaya alınır
- 3.12. System 3 kapatılır.