



Doküman No: FTR-GT12

Yürürlük Tarihi: 5.6.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

## BODY FAT ANALYZER CİHAZI KULLANIM TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
25.10.2005	Yönetim Değişikliği	1
02.01.2014	Yapıldı	2
	Yönetim Değişikliği	
	Yapıldı	

HAZIRLAYAN: Özlem ÖNER

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT12

Yürürlük Tarihi: 5.6.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

## BODY FAT ANALYZER CİHAZI KULLANIM TALİMATI

**1. AMAÇ:** Bot fat analyzer cihazını doğru bir şekilde kullanmak.

**2. KAPSAM:** Tüm fizyoterapistleri kapsar.

**3. UYGULAMA:**

- 3.1. Sol alt taraftaki on/off düğmesinden alet açılır.
- 3.2. Ölçüm için C/E anahtarına basılır, 1=metric konumu seçilir.
- 3.3. Enter tuşuna basılır.
- 3.4. Cinsiyeti (0=erkek,1=kadın) girilerek enter tuşuna basılır.
- 3.5. Boy girilerek (cm cinsinden) enter tuşuna basılır.
- 3.6. Kilo girilerek enter tuşuna basılır.
- 3.7. Yaş girilerek enter tuşuna basılır.
- 3.8. Teste başlamak için enter tuşuna basılır.
- 3.9. 5 saniye beklenir, ekranda sonuçlar görülür.