



Doküman No: FTR-GT13

Yürürlük Tarihi: 5.6.2001

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

ENS 931 KAS STİMULASYON CİHAZI KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
25.10.2005	İçerik Değişikliği Yapıldı	1
02.01.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	2

HAZIRLAYAN: Özlem ÖNER

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT13

Yürürlük Tarihi: 5.6.2001

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

ENS 931 KAS STİMULASYON CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ: ENS Kas Stimulasyon cihazını doğru bir şekilde kullanmak.

2. KAPSAM: Tüm fizyoterapistleri kapsar.

3. UYGULAMA

3.1. Cihazın sol baştan ikinci düğmeden akımın frekansı, üçüncü düğmeden akım düğmesi ve dördüncü düğmeden dinlenme süresi ayarlanır.

3.2. Elektrot yüzeylerine jel sürülerek uygulama bölgesine yerleştirilir.

3.3. Cihazın sol baştaki düğmesinden birinci devrenin akımı, sağ baştaki düğmeden ikinci devrenin akımı ayarlanır.

3.4. Uygulama sonucunda önce akım kapatılır. Sonra elektrotlar çıkartılır.

3.5. Elektrotlar duru suyla temizlenir, sonra kurulanır.