



Doküman No: FTR-GT14

Yürürlük Tarihi: 5.6.2001

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

ENS 911 TENS CİHAZINI KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
25.10.2005	İçerik Değişikliği Yapıldı	1
02.01.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	2

HAZIRLAYAN: Özlem ÖNER

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT14

Yürürlük Tarihi: 5.6.2001

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

ENS 911 TENS CİHAZINI KULLANMA TALİMATI

- 1. AMAÇ:** Ens 911 Tens cihazını doğru bir şekilde kullanmak.
- 2. KAPSAM:** Tüm fizyoterapistleri kapsar.
- 3. UYGULAMA**
 - 3.1.** Cihazın sol baştan ikinci ve üçüncü düğmesinden akımın frekansı, dördüncü düğmeden modalitesi ayarlanır.
 - 3.2.** Elektrot yüzeylerine jel sürülerek uygulama bölgesine yerleştirilir.
 - 3.3.** Sol baştaki düğmeden birinci devrenin akımı sağ baştaki düğmeden ikinci devrenin akımı ayarlanır.
 - 3.4.** Uygulama sonunda önce cihaz kapatılır. Sonra elektrotlar çıkartılır.
 - 3.5.** Elektrotlar duru suyla temizlenir, sonra kurulanır.