



Doküman No: FTR-GT15

Yürürlük Tarihi: 5.6.2001

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

PHYACTION GUIDANCE E ELEKTROTERAPİ CİHAZINI KULLANMA
TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
25.10.2005	Yönetim Değişikliği	1
02.01.2014	Yapıldı	2
	Yönetim Değişikliği	
	Yapıldı	

HAZIRLAYAN: Özlem ÖNER

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT15

Yürürlük Tarihi: 5.6.2001

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

PHYACTION GUIDANCE E ELEKTROTERAPİ CİHAZINI KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ: Phyaction guidance E elektroterapi cihazını doğru bir şekilde kullanmak.

2. KAPSAM: Tüm fizyoterapistleri kapsar.

3. UYGULAMA

3.1. Sağ yan taraftaki on-off düğmesinden cihaz açılır.

3.2. Elektrotlar pedlere yerleştirilerek hasta üzerine takılır.

3.3. Akım verilecek kanal seçilir. Kanalın bağlı olduğu düğmeden akım tipi seçilir. Süre ayarlanır. Akım verilir.

3.4. Vakum elektrotla uygulama yapılacaksa cihazın alt tarafında sağdaki düğmeden vakum açılır. Vakum elektrotlar hasta üzerine yerleştirilir. Süre ayarlanır. Akım verilir.

3.5. Uygulama bittiği zaman önce elektrotlar çıkarılır. Sonra cihaz kapatılır.