



Doküman No: FTR-GT16

Yürürlük Tarihi: 16.6.2003

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

EN-TREE EGZERSİZ EĞİTİM CİHAZI KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayınlandı	0
25.10.2005	Yönetim Değişikliği	1
02.01.2014	Yapıldı	2
	Yönetim Değişikliği	
	Yapıldı	

HAZIRLAYAN: Nisa ÖZBERK

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT16

Yürürlük Tarihi: 16.6.2003

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

EN-TREE EGZERSİZ EĞİTİM CİHAZI KULLANIM TALİMATI

- 1. AMAÇ:** EN-TREE egzersiz eğitim cihazının doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
- 2. KAPSAM:** Tüm fizyoterapistleri kapsar.
- 3. UYGULAMA:**
 - 3.1.** Hasta çalıştırılacak bölgeye göre cihazın önünde fizyoterapist tarafından pozisyonlanır.
 - 3.2.** Cihazda vidalı kol çalıştırılacak eklem yüksekliğinde fizyoterapist tarafından ayarlanır.
 - 3.3.** Hastanın durumuna ve çalıştırılacak ekleme göre ağırlık kolu fizyoterapist tarafından ayarlanır.
 - 3.4.** Fizyoterapistin belirlediği sayıda hasta çalıştırılır.
 - 3.5.** Fizyoterapist tarafından çalışma sonlandırıldıktan sonra ağırlık kolu 0 kg konumunda sabitlenir