



Doküman No: FTR-GT18

Yürürlük Tarihi: 28.01.2010

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

BİODEX BALANCE SYSTEM SD CİHAZI KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

| Değişiklik Tarihi | Açıklama | Değişiklik No |
|-------------------|-----------------|---------------|
| - | Yeni yayımlandı | 0 |

HAZIRLAYAN: Fadime KIRBAŞ

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT18

Yürürlük Tarihi: 28.01.2010

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

BİODEX BALANCE SYSTEM SD CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1.AMAÇ: Biodex Balance System SD cihazını doğru şekilde kullanmak.

2.KAPSAM: Tüm fizyoterapistleri kapsar.

3.UYGULAMA:

- 3.1. ON düğmesine basılarak cihaz açılır.
- 3.2. Uygulanacak program seçilir.(Test ya da eğitim protokolü)
- 3.3. Hasta girişi yapılır.(Hastanın yaş,boy,kilo vs)
- 3.4. Hasta denge cihazına yerleştirilir.
- 3.5. Gerekli ayarlamalar yapılır.
- 3.6. Start düğmesine basılır.
- 3.7. Çalışma bitiminde stop düğmesine basılır.
- 3.8. Standby düğmesine basılarak cihaz kapatılır.