



Doküman No: FTR-GT19

Yürürlük Tarihi: 25.10.2005

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

ENDOR 2000 TENS CİHAZI KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
02.01.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	1

HAZIRLAYAN: Fadime KIRBAŞ

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT19

Yürürlük Tarihi: 25.10.2005

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

ENDOR 2000 TENS CİHAZI KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ: ENDOR 2000 TENS cihazını doğru bir şekilde kullanmak.

2. KAPSAM: Tüm fizyoterapistleri kapsar.

3. UYGULAMA:

3.1. Cihazın kapağı açılır.Soldaki ilk düğmeden akımın frekansı,sağdaki ilk düğmeden atım genişliği,ortadaki düğmelerden ise modalitesi ayarlanır.

3.2. Elektrot yüzeylerine jel sürülerek uygulama bölgesine yerleştirilir.

3.3. Cihazın üst kısmında sağ baştaki düğmeden birinci devrenin akımı ,sol baştaki düğmeden ikinci devrenin akımı ayarlanarak uygulama yapılır.

3.4. Uygulama sonunda önce cihaz kapatılır.Sonra elektrotlar çıkarılır.