



Doküman No: FTR-GT20

Yürürlük Tarihi: 25.10.2005

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

SPORTS ART KOŞU BANDINI KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
02.01.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	1

HAZIRLAYAN: Fadime KIRBAŞ

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT20

Yürürlük Tarihi: 25.10.2005

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

SPORTS ART KOŞU BANDINI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ: Koşu bandı cihazını doğru bir şekilde kullanmak.

2. KAPSAM: Tüm fizyoterapistleri kapsar.

3. UYGULAMA:

- 3.1. Aletin sol -alt-ön köşesindeki açma kapama düğmesi 0'dan 1 konumuna getirilir.
- 3.2. Sağdaki press to stop düğmesine bastırılıp sağa doğru çevrilir. Böylelikle alet kullanılır hale getirilir.
- 3.3. Enter düğmesine basılır.
- 3.4. Incline yazılı düğmedeki oklar kullanılarak hastanın yaşı girilir. Enter düğmesine basılır.
- 3.5. Incline yazılı düğmedeki oklar kullanılarak hastanın kilosu girilir. Enter düğmesine basılır.
- 3.6. Sağdaki scrool düğmesi kullanılarak uygun program seçilir. Enter düğmesine basılır.
- 3.7. Speed yazılı düğmeden hız ayarı yapılır.
- 3.8. Incline yazılı düğmeden eğim ayarı yapılır.
- 3.9. Emniyet düğmesi hastaya takılır.
- 3.10. Uygulama yapılır.