



Doküman No: FTR-GT22

Yürürlük Tarihi: 25.10.2005

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

TENS CARE STİMULASYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
02.01.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	1

HAZIRLAYAN: Fadime KIRBAŞ

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT22

Yürürlük Tarihi: 25.10.2005

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

TENS CARE STİMULASYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI

- 1. AMAÇ:** TENS CARE Stimulasyon cihazını doğru bir şekilde kullanmak
- 2. KAPSAM:** Tüm fizyoterapistleri kapsar.
- 3. UYGULAMA:**
 - 3.1.** Elektrot yüzeylerine jel sürülerek uygulama bölgesine yerleştirilir.
 - 3.2.** Cihazın kapağı açılır ve on-off düğmesine basılır.
 - 3.3.** -P+Yazılı düğmeye basılır.Uygun program seçilir.
 - 3.4.** -L1+ ve -L2+ düğmeleri açılarak akımın dozajı ayarlanır.
 - 3.5.** Uygulama sonunda önce cihaz kapatılır.Sonra elektrotlar çıkartılır.
 - 3.6.** Elektrot yüzeyleri duru suyla temizlenir,kurulanır.