



Doküman No: FTR-GT23

Yürürlük Tarihi: 25.10.2005

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

## PORTATİF INFRARUJ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
02.01.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	1

HAZIRLAYAN: Fadime KIRBAŞ

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT23

Yürürlük Tarihi: 25.10.2005

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

## PORTATİF INFRARUJ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

**1.AMAÇ:** Infraruj cihazını doğru bir şekilde kullanmak.

**2. KAPSAM:** Tüm fizyoterapistleri kapsar.

**3. UYGULAMA:**

**3.1.** Aletin fişi prize takılır.

**3.2.** Aletin üzerindeki açma kapama düğmesine basılır.

**3.3.** Alet hasta üzerinde pozisyonlanır.

**3.4.** 15-20 dakika uygulama yapılır.

**3.5.** Süre bitince açma kapama düğmesine basılarak alet kapatılır.