



Doküman No: FTR-GT24

Yürürlük Tarihi: 03.04.2006

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

UNIPHY PHYACTION CİHAZINI KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
02.01.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	1

HAZIRLAYAN: Fadime KIRBAŞ

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT24

Yürürlük Tarihi: 03.04.2006

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

UNIPHY PHYACTION CİHAZINI KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ: Uniphy Phyaction cihazı doğru bir şekilde kullanmak.

2. KAPSAM: Tüm fizyoterapistleri kapsar.

3. UYGULAMA:

3.1. Aletin arka-üst tarafındaki düğmeden alet açılır.

3.2. Uygulanacak program seçilir.

3.3. US uygulanacaksa tedavi süresi ve dozaj ayarlanır.

3.4. Diğer uygulamalarda elektrotlar pedlere yerleştirilerek hasta üzerine takılır.

3.5. Akım verilecek kanal seçilir. Kanalın bağlı olduğu düğmeden akım tipi seçilir.Süre ayarlanır.Akım verilir.

3.6. Vakum elektrotla uygulama yapılacaksa cihazın arka -alt tarafındaki düğme 1 konumuna getirilir. Vakum elektrotlar hasta üzerine yerleştirilir.Süre ayarlanır. Akım verilir.

3.7. Uygulama bittiği zaman önce elektrotlar çıkartılır.Sonra cihaz kapatılır.