



Doküman No: İYÜ-GT02

Yürürlük Tarihi: 20.12.2011

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

NEBULAZASYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Güzin BALÇILAR

Hemşire

İMZA

ONAYLAYAN: Kutlu KÖSTERİT

İlk Yardım Ünitesi Sorumlusu

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: İYÜ-GT02

Yürürlük Tarihi: 20.12.2011

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

NEBULAZASYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI

1. **AMAÇ:** Aletin doğru bir şekilde kullanımını sağlamak
2. **KAPSAM:** İlk Yardım Ünitesi hemşirelerini ve sağlık memurlarını kapsar.
3. **UYGULAMA:**
 - 3.1. Aletin fişi prize takılır.
 - 3.2. Cihazı açma kapama düğmesinden açın cihaz açılır açılmaz fan çalışmaya başlayacak ve nebulazasyon işlemi başlayacaktır.
 - 3.3. Hava üfleme hacmini ve nebulazasyon seviyesini air volüme ve nebulisation volume düğmeleriyle hortumdan çıkan havayı kontrol ederek ayarlayabilirsiniz.
 - 3.4. Hava hacmi 11 seviye ve nebulizasyon seviyesini 10 seviye ayar düğmelerini yanındaki seviye göstergeleri ile kontrol edebilirsiniz.
 - 3.5. İnhalasyon süresi düğmenin saat yönünde çevrilmesi ile ayarlanmaktadır.
 - 3.6. Sayaç 15 dakikaya kadar 1 er dakikalık aralarla ayarlanabilir 15-30 dakika arasında 1 veya 2 dakikalık aralıklarla programlanabilmektedir.
 - 3.7. Aralıksız nebulizasyon için sayaç düğmesini saat yönünde hareket ettirerek continous ibaresine getirin sayaçta aralıksız ibaresi görülecektir.

4. İLACIN İLAÇ KABINA KOYULMASI

- 4.1. İlaç kabı kapağını saat yönünde tersine çevirerek çıkarın, ilacın kaba boşaltın maksimum 150ml olacak şekilde
- 4.2. İlaç kabı kapağını saat yönünde çevirerek kapattıktan sonra ana üniteye monte edin kapağın tam olarak kapağından emin olun
- 4.3. Nebülizatörü ana üniteye saat yönünün tersinde çevirerek monte edin inhalasyon hortumu ve ağızıyla ekleyin cihazı açarak ekranda görülen parçalarda hata mesajı olup olmadığını kontrol edin .

5. AŞAĞIDAKİ HALLERDE CİHAZ SESLİ UYARI VERİR VE ÇALIŞMAYI DURDURUR

- 5.1. Seçilen zaman dolduğunda
- 5.2. İnhalasyon süresince ilaç kapağı yerinden oynadığında
- 5.3. Su tankındaki seviye yeterli değilse
- 5.4. Fan kapağı açıldığında



Doküman No: İYÜ-GT02

Yürürlük Tarihi: 20.12.2011

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

NEBULAZASYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI

Herhangi bir hata sonunda cihaz sesli uyarı verdiği hata mesajı ekranda görülecektir. Açma kapama tuşuna basarak alarmı kapatabilirsiniz, bu durumda ekrandaki hata mesajını kontrol ediniz.