



Doküman No: İYÜ-GT03

Yürürlük Tarihi: 20.10.2000

Değişiklik No: 3

Değişiklik Tarihi: 08.12.2014

CRYO CUFF KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
10.04.2002	Birim İsminde ve Talimat İsminde Değişiklik Yapıldı	1
05.10.2005	Yönetim Değişikliği Yapıldı	2
08.12.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	3

HAZIRLAYAN: Güzin BALCILAR

Hemşire

İMZA

ONAYLAYAN: Kutlu KÖSTERİT

İlk Yardım Ünitesi Sorumlusu

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: İYÜ-GT03

Yürürlük Tarihi: 20.10.2000

Değişiklik No: 3

Değişiklik Tarihi: 08.12.2014

CRYO CUFF KULLANMA TALİMATI

- 1. AMAÇ:** Soğutucunun doğru olarak kullanılmasını sağlamak
- 2. KAPSAM:** İlk Yardım Ünitesi hemşirelerini ve sağlık memurlarını kapsar.
- 3. UYGULAMA:**
 - 3.1.** Cihazın 3/1 soğuk su ile doldurulur.
 - 3.2.** Cihazın 3/2 buz ile doldurulur.
 - 3.3.** Cihazın üzerinde bulunan hava sirkülasyon deliğinin açık olması kontrol edilir.
 - 3.4.** Cihaz yüksek bir yere asılır.
 - 3.5.** Air cast hastaya takılır.
 - 3.6.** Cryo Cuff hortumu air cast'ta takılır.
 - 3.7.** Cihazın çalışır durumda olduğu kontrol edilir.