



Doküman No: İYÜ-GT05

Yürürlük Tarihi: 11.12.2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

PHILIPS HASTA BAŞI MONİTÖRÜ KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Şenay TILKI

Hemşire

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: İYÜ-GT05

Yürürlük Tarihi: 11.12.2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

PHILIPS HASTA BAŞI MONİTÖRÜ KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ: Hasta başı monitörünün doğru olarak kullanılmasını sağlamak

2. KAPSAM : İlk yardım ünitesindeki hemşirelerini ve sağlık memurlarını kapsar.

3. UYGULAMA

3.1. Cihazın elektriğe takılı olup olmadığını kontrol edilmelidir.

3.2. Cihaz batarya ile çalıştırılacak ise bataryanın dolu olup olmadığını kontrol ediniz.

3.3. Cihazın sağ alt köşesindeki açma /kapama düğmesi ile açılır.

KAN BASINCI İZLEME

1.4. Hastanın kan basıncı ve nabızı ölçülmek isteniyorsa manşet hastanın koluna sarılır ve cihazın sağ üstten ikinci düğmesine basılır . Sonuç ekranda görülür

EKG İZLEME

1.5. Hastanın EKG si izlenmek isteniyorsa EKG kablosu cihazın sol tarafında işaretli girişe takılır ve EKG kablosunun diğer uçları hastanın göğüs bölgesine yerleştirilerek EKG izlenir.

SPO2 İZLEME

3.6 . Hastada SPO2 ölçülmek isteniyorsa SPO2 kablosu cihazın sağ tarafında işaretli girişe takılır ve kablonun diğer ucundaki parmak girişi hastaya takılır ve ölçüm monitörden izlenir.