



Doküman No: İYÜ-GT07

Yürürlük Tarihi: 11.12.2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

AMSCO EAGLE- TEN OTOKLAV CİHAZI KULLANIM
TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

| Değişiklik Tarihi | Açıklama | Değişiklik No |
|-------------------|-----------------|---------------|
| - | Yeni yayımlandı | 0 |

HAZIRLAYAN: Güzün BALCILAR

Hemşire

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: İYÜ-GT07

Yürürlük Tarihi: 11.12.2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

AMSCO EAGLE- TEN OTOKLAV CİHAZI KULLANIM TALİMATI

- 1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı otoklav cihazını doğru bir şekilde kullanmak
- 2. KAPSAM :** Bu talimat İlk Yardım Ünitesi hemşiresini kapsar.
- 3. UYGULAMA**
 - 3.1.** Cihazın ön bölümünde sterilizasyon odasının kapağı ve yanında elektronik gösterge ve dokunmatik tuşlar bulunur. Üst kısmında ise su tankının kapağı mevcuttur.
 - 3.2.** Cihaza su tankının kapağı açılarak distile su konulur, su seviyesinin maximum göstergesine kadar su doldurulur.
 - 3.3.** Elektronik panelden cihaz 134⁰C'ye ayarlanır. Ayrıca sterilizasyon süresi ve kurutma süreleri de 10 dk. ya ayarlanır.
 - 3.4.** Steril edilecek malzeme sterilizasyon bölümüne yerleştirilerek kapak kapatılır.
 - 3.5.** Fiş takıldıktan sonra otoklavın arka sağ üst bölümündeki reset tuşuna basılır. Sonra elektronik paneldeki start tuşuna basılır ve sterilizasyonu başlatmak için yine elektronik paneldeki katı maddeleri steril eden GRAVITY tuşuna basılır.
 - 3.6.** Cihaz sterilizasyon ısını ve zamanlarını elektronik panelde gösterir ve sterilizasyon bittiğinde uyarı sinyali verir. Ayrıca otoklav açıldıktan sonra aletin bütün yaptığı işlemlerin zamanı ve sırası elektronik panelin altındaki printer bölümünden görülür ve istenildiğinde kağıt print edilerek alınır.
 - 3.7.** Kapak ¼ oranında açılır ve 10 dk. bekletildikten sonra otoklav içindeki malzemeler çıkarılır.
 - 3.8.** Sterilizasyon işlemi bitince otoklav elektronik paneldeki tuşlardan sırasıyla reset, stand by ve arka bölümdeki OFF düğmelerinden kapatılır.