



Doküman No: İYÜ – GT10

Yürürlük Tarihi: 20.10.2000

Değişiklik No: 4

Değişiklik Tarihi: 05.09.2012

## EKG CİHAZI KULLANMA TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
10.04.2002	İçerik Değişikliği Yapıldı	1
17.12.2002	İçerik Değişikliği Yapıldı	2
05.10.2005	Yönetim Değişikliği Yapıldı	3
05.09.2012	İçerik Değişikliği Yapıldı	4

HAZIRLAYAN: Güzün BALCILAR

Hemşire

İMZA

ONAYLAYAN: Kutlu KÖSTERİT

İlk Yardım Ünitesi Sorumlu  
Hekimi

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: İYÜ – GT10

Yürürlük Tarihi: 20.10.2000

Değişiklik No: 4

Değişiklik Tarihi: 05.09.2012

## EKG CİHAZI KULLANMA TALİMATI

**1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı EKG cihazını doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat SRM hemşirelerini ve Sağlık Memurlarını kapsar.

### **3. UYGULAMA:**

**3.1.** Hasta işleme alınmadan yapılacak uygulama kendisine anlatılır.

**3.2.** Hastaya üst giysileri, ayakkabı, çorap, saat ve takıları çıkarılması söylenir.

**3.3.** EKG aletinin paletleri hastanın göğüs bölgesine, el ve ayak bileklerine numaralarına göre sırayla yerleştirilir. (Gerekirse paletlerin yapıştırılacağı bölgeler traş ettirilir.)

**3.4.** Hastanın çekim esnasında sırt üstü pozisyonda yatması, rahat olması, konuşmaması ve hareket etmemesi söylenir.

**3.5.** Daha sonra her kolla yapıştırılmış olan uygun paletlere sırasıyla yerleştirilir.

*Göğüs paletleri C1, C2, C3, C4, C5, C6*      *Sağ el=Kırmızı N*

*Sol el=Sarı L*      *Sağ ayak=Siyah N*      *Sol ayak=Yeşil L*

**3.6.** Cihazın ön kısmında ekran ve tuşlar bulunmaktadır.

**3.7.** Fişi taktıktan sonra en alt sol kısımdaki büyük tuşa basınız.

**3.8.** Ekran görüntüsü geldikten sonra F1 tuşuna basıp hastanın bilgilerini giriniz. Sonra ELTER tuşuna basınız.

**3.9.** Tekrar ekran görüntüsü geldikten sonra MODE tuşundan çekilmek istenen ritim şeklini belirleyiniz.

**3.10.** Belirlediğiniz şekilde çekim yaparken görüntüde parazit var ve bu nedenden çıktı alamıyorsanız F2 tuşuna basıp ekranı sabitleyebilirsiniz. Ya da F5 tuşuna basıp filtrenin koruyuculuğunu artırabilirsiniz.

**3.11.** Görüntüde sorun yoksa START tuşuna basıp bekleyiniz.

**3.12.** Ekranda üstte ortada kaydediliyor yazısını gördükten sonra F4 tuşuna basıp çıktı alabilirsiniz.

**3.13.** Eğer ritimli çekim yapmak istiyorsanız çekim şeklini belirleyip START tuşuna basıp bekleyiniz sonra kaydediliyor yazısını gördükten sonra F4



Doküman No: İYÜ – GT10

Yürürlük Tarihi: 20.10.2000

Değişiklik No: 4

Değişiklik Tarihi: 05.09.2012

## EKG CİHAZI KULLANMA TALİMATI

tuşuna basınız. İstedığınız kısımda durdurmak için tekrar START tuşuna basmanız gerekmektedir.

3.14. İşlem bittikten sonra en alt soldaki büyük tuşa basınız.

F1: Hasta bilgileri

F2: İşlemi sabitlemek için kullanılır

F3: Hızını seçer

F4: Dalga boyunu seçer

F5: Ayarlar

F6: Kayıtlı hastaları görmek için kullanılır

3.15. Hastanın üstündeki paletlerin çıkarılmasına yardımcı olunur.