



Doküman No: İYÜ – GT11

Yürürlük Tarihi: 17.12.2002

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 05.10.2005

SOLUNUM FONKSİYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
05.10.2005	Yönetim Değişikliği Yapıldı	1

HAZIRLAYAN: Şenay TİLKİ

Hemşire

İMZA

ONAYLAYAN: Yaşar Çetin URAL

İlk Yardım Ünitesi Sorumlu
Hekimi

İMZA

ONAYLAYAN: Emine ÇELİK

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: İYÜ – GT11

Yürürlük Tarihi: 17.12.2002

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 05.10.2005

SOLUNUM FONKSİYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı SFT cihazının doğru bir şekilde kullanılmasına sağlamaktır.

2. KAPSAM: Bu talimat SRM hemşirelerini kapsar.

3. UYGULAMA:

3.1. Yapılacak işlem hastaya anlatılır.

3.2. SFT cihazı sağ tarafındaki düğmeye basılarak açılır.

3.3. Ekranda çıkan tarih doğru ise “Y”, yanlış ise “N” tuşuna basılarak doğru tarih girilir.

3.4. “ENTER” tuşuna basılır. Ekranda çıkan bilgiler (Ortam sıcaklığı, sıra numarası, yaş, boy, cinsiyet, etnik köken) “Enter” tuşu ile ilerlenerek doldurulur.

3.5. Cihazın başlığına yeni ağızlık takılır.

3.6. Ana menüye gelinerek doktor istemine göre 1,2 ve ya 7 numaralı tuşa basarak gerekli testler yapılır.

3.7. “Enter” tuşu ile ilerlenerek 3 numaralı yazdır tuşu ile sonuç yazılır. Hastaya verilir.

3.8. Ana menüdeki seçeneklerin işlevleri şu şekildedir:

3.8.1. VC TESTİ: Hastaya derin nefis alarak bir seferde nefesinin tamamını kesiksiz üflemesi söylenir.

3.8.2. FVC TESTİ: Hastaya derin nefes aldırılarak bir seferde çok kuvvetli üflemesi söylenir.

3.8.3. YAZDIR: İşlem tamamlandıktan sonra sonucun yazdırılarak çıktı almayı sağlar.

3.8.4. SONUÇLARI SİL: Yapılan tetkiklerin sonuçlarını siler.

3.8.5. YENİ HASTA: Yeni hastaya geçişi sağlar.

3.8.6. KALİBRASYON KONTROLÜ: Kalibrasyon kontrolü firma tarafından yapılır.

3.8.7. POST – MOD: Bu menü hastaya işlem dahilindeki ilacın uygulanmasından 2-3 dakika sonra 1 ve 2 numaralı menü tekrarlanarak yapılır.