



Doküman No: İYÜ-GT12

Yürürlük Tarihi: 11.12.2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

POWEHEARTART AED G3 OTOMATİK EXTERNAL DEFİBRİLATÖR
KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Şenay TİLKİ

Hemşire

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: İYÜ-GT12

Yürürlük Tarihi: 11.12.2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

POWEHEARTART AED G3 OTOMATİK EXTERNAL DEFİBRİLATÖR KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı AED cihazının doğru şekilde kullanılmasını sağlamaktır

2. KAPSAM : Tüm Doktorlar, Hemşireler ve Sağlık memurları
Bu cihaz kalp ritmindeki VF (ventriküler fibrilasyon) ya da VT(ventriküler taşikardi) ve kardiyak arrest gibi durumlarında defibrilasyon yaparak kalp ritminin normale dönmesini sağlamaktır.

3. UYGULAMA

3.1. Hastanın göğüs bölgesi açılır.

3.2. Cihazın kapağını açınız ve türkçe seslendirmeyi bekleyiniz.(5-7 sn).
Türkçe seslendirme ile kullanıcı adım adım yönlendirilmektedir.

3.3. Yönlendirmeye göre pedleri hazırlayınız.(tek kullanımlık jelli ve kendiliğinden yapışkan elektrotlar kapağın iç kısmında takılı durumdadır.)

3.4. Yönlendirmeye göre pedleri hastanın göğüs bölgesine (sternum ve apex) yerleştiriniz.

3.5. Yönlendirme basamaklarına göre SHOCK düğmesine basınız.

3.6. Pedler hastaya bağlanmadıysa SHOCK düğmesi inaktiftir.