



Doküman No: İYÜ – GT13

Yürürlük Tarihi:05.10.2005

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 08.12.2014

EKG (LANDSCAPE) CİHAZI KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
08.12.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	2

HAZIRLAYAN: Şenay TİLKİ

Hemşire

İMZA

ONAYLAYAN: Kutlu KÖSTERİT

İlk Yardım Ünitesi Sorumlu
Hekimi

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: İYÜ – GT13

Yürürlük Tarihi:05.10.2005

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 08.12.2014

EKG (LANDSCAPE) CİHAZI KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı EKG cihazını doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM: Bu talimat SRM hemşirelerini ve Sağlık Memurlarını kapsar.

3. UYGULAMA:

3.1. Hasta işleme alınmadan yapılacak uygulama kendisine anlatılır.

3.2. Hastaya üst giysileri,ayakkabı,çorap,saat ve takıları çıkarılması söylenir.

3.3. EKG aletinin paletleri hastanın göğüs bölgesine,el ve ayak bileklerine cihaz üzerindeki resme göre yerleştirilir.Toplam 10 elektrod kullanılır.(Gerekirse paletlerin yapıştırılacağı bölgeler traş ettirilir.)

3.4. Hastanın çekim esnasında sırt üstü pozisyonda yatması,rahat olması,konusmamasıve hareket etmemesi söylenir.

3.5. Daha sonra her kobla yapıştırılmış olan uygun paletlere sırasıyla yerleştirilir.

Göğüs paletleri C1,C2,C3,C4,C5,C6

Sağ el=Kırmızı N

Sağ ayak=siyah N

Sol el=Sarı L

Sol ayak=Yeşil L

3.6. Cihaz sol alt taraftaki ON/OFF tuşuna basılarak açılır.

3.7.Ekranda düzgün ritm alınınca sağdaki ENTER tuşu ile hafızaya alınır.

3.8.Tekrar ENTER tuşu ile sonuç print' edilir.

3.9.Tüm işlemler bittikten sonra ON/OFF düğmesi ile cihaz kapatılır.

3.10.Hastanın üzerindeki paletlerin çıkarılmasına yardımcı olunur.