



Doküman No: İYÜ-GT15

Yürürlük Tarihi: 17.12.2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

## THERMOSCAN (BRAUN) CİHAZI KULLANIM TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Güzün BALCILAR

Hemşire

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: İYÜ-GT15

Yürürlük Tarihi: 17.12.2009

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

## THERMOSCAN (BRAUN) CİHAZI KULLANIM TALİMATI

**1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı Thermoscan cihazının doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

**2. KAPSAM :** Bu talimat Sağlık ve Rehberlik Merkezi hemşirelerini ve sağlık memurlarını kapsar.

### 3. UYGULAMA

- 3.1. Hastaya yapılacak işlem önce anlatılır.
- 3.2. Thermoscan cihazının kapağı çıkartılır.
- 3.3. Thermoscan cihazının ucuna yeni ve temiz yedek filtre takılır.
- 3.4. Start tuşuna basılır, dijital ekranda 3(üç) çizgi olana kadar beklenilir.
- 3.5. Cihaz kulak içerisine hafifçe konur ve cihazın alarm vermesi beklenir.
- 3.6. Cihazdan ses geldikten sonra ekranındaki yazı okunur.
- 3.7. Cihazın ortasındaki düğmeye basılarak kirli filtre çıkarılır ve kapağı kapatılır.