



Doküman No: KBB-GT05

Yürürlük Tarihi: 11.02.2013

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi: -

GSİ 38 AUTO TYMP KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Betül GÜLBULAK

Kulak Burun Boğaz Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: KBB-GT05

Yürürlük Tarihi: 11.02.2013

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi: -

GSİ 38 AUTO TYMP KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ: KBB biriminde bulunan Timpanometri aletinin, tüm KBB uzmanları ve müdahale odası çalışanlarının kullanması için yöntem belirlemektedir.

2. KAPSAM: Tüm KBB uzmanları ve müdahale odası çalışanlarını kapsar.

3. UYGULAMA: Timpanometri aleti aşağıdaki talimat doğrultusunda çalıştırılır:

3.1. Sol arkada bulununan on/off düğmesi ile açılır.

3.2. Yapılması istenen teste göre cihazın klavyesindeki orta bölümde bulunan koyu kahverengi Odyometri, Timpanometri veya Timpanometri+Reflex modlarından herhangi bir tanesi seçilir.

3.3. R veya L tuşlarıyla sağ ve sol seçimi yapılır. Print almak için klavyenin sol üstünde bulunan yazdırma tuşuna basılır.