



Doküman No: KBB-GT06

Yürürlük Tarihi: 11.02.2013

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi: -

## ENDOVİZYON KAMERA ÜNİTESİNİN ÇALIŞMA TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Betül GÜLBULAK

Kulak Burun Boğaz Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: KBB-GT06

Yürürlük Tarihi: 11.02.2013

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi: -

## ENDOVİZYON KAMERA ÜNİTESİNİN ÇALIŞMA TALİMATI

**1. AMAÇ:** KBB biriminde bulunan Endoskopi ünitesine bağlı endovizyon kamera ünitesinin, tüm KBB uzmanları ve müdahale odası çalışanlarının kullanması için yöntem belirlemektedir.

**2. KAPSAM:** Tüm KBB uzmanları ve müdahale odası çalışanlarını kapsar.

**3. UYGULAMA:** Envizyon aleti aşağıdaki talimat doğrultusunda çalıştırılır:

**3.1.** Storz marka kamera kontrol ünitesinin sağ üst köşesindeki güç düğmesi açılır.

**3.2.** Sony monitörün sol alt kısmındaki güç düğmesi açılır.

**3.3.** Sony DVD recorder sol köşesindeki güç düğmesine basılır.

**3.4.** Endovizyona bağlı soğuk ışık kaynağı Storz soldaki güç düğmesine basılır.

**3.5.** Endovizyon ünitesi ile görüntüleme yapılır.

**3.6.** Sony video printer sağ alttaki düğmesi açılır. Capture düğmesine basıldıktan sonra print düğmesine basıldığında ekran görüntüsü karta basılı olarak çıkar.