



Doküman No: KD-GT01

Yürürlük Tarihi: 18.01.2001

Değişiklik No: 3

Değişiklik Tarihi: 17.11.2014

ULTRASONOGRAFİ (RT-X200) CİHAZI KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
24.01.2003	İsim Değişikliği Yapıldı	1
25.10.2005	Yönetim Değişikliği Yapıldı	2
17.11.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	3

HAZIRLAYAN: M.Fatih DEMİRTOLA

Kadın Doğum Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: KD-GT01

Yürürlük Tarihi: 18.01.2001

Değişiklik No: 3

Değişiklik Tarihi: 17.11.2014

ULTRASONOGRAFİ (RT-X200) CİHAZI KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ: Ultrasonografi (RT-X200) cihazını doğru biçimde kullanmak için yol belirlemektir.

2. KAPSAM: Kadın Doğum Hekimini kapsar.

3. UYGULAMA:

3.1. Power düğmesi, ön- sol üst tarafta olup , ON-OFF (O - I) düğmesi ile açılıp kapatılır. Cihaz açıldıktan sonra 5 saniye sonra görüntü ekrana gelir. Çalışmaya hazır durumdadır.

3.2. Hasta bilgisi tuşuna basılır. Ekranda:

ID

Hasta Adı

Tarih parametleleri çıkar.

3.3. Hasta adı, soyadı bilgileri girilir. En altta Exit (çıkış) kısmına geldikten sonra 'freeze' tuşuna basılarak ultrasonografik inceleme konumuna geçilir.

3.4. Ultrasonografi cihazımızda; Konveks probe: 3,5m Hz, derece taramalı prob mevcuttur. Bununla inceleme yapılır.

3.5. Ultrasonografi cihazının altındaki resim makinasının print düğmesine basılarak görüntü alınır.