



Doküman No: LAB-GT01

Yürürlük Tarihi: 17.11.2014

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

## VİDAS KULLANIM TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Esen BOSTANCI

Biyolog

İMZA

ONAYLAYAN: Nusret TAHERİ

Başhekim

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: LAB-GT01

Yürürlük Tarihi: 17.11.2014

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

## VİDAS KULLANIM TALİMATI

- 1. AMAÇ:** Vidas cihazını cihazını doğru bir şekilde kullanmak.
- 2. KAPSAM:** Tüm Laboratuvar çalışanlarını kapsar.
- 3. UYGULAMA:**
  - 3.1.** Cihazın arkasındaki ON/OFF tuşundan açılır. Ardından cihazın bağlı olduğu bilgisayar açılır. Masaüstündeki VİDAS PC programı açılır. Ana ekrandaki “kompartman hazırlığı ve yükleme” menüsü seçilir. Cihazın 37° C sıcaklığa gelmesi beklenir. Kompartmanlardaki “MÜSAİT” yazısı görüldüğünde cihaz hasta çalışmak için hazır konumdadır.
  - 3.2.** Cihazda çalışan testlerin kalibrasyonları günlük olarak kontrol edilir. Kalibrasyonu biten test varsa kalibrasyonları yapılır.
  - 3.3.** Yükleme ekranında çalışılacak önce test seçilir sonra hasta barkod numarası girilir.
  - 3.4.** Çalışılacak test striptleri oda sıcaklığına kadar ısınması beklenip hasta plazması mikropipet ile striptin ilk kuyucuğuna gerekli miktar kadar koyulur. Sonrasında hazır olan striptler uygun kompartmanlara yerleştirilir. “MÜSAİT” yazan kompartman üzerine tıklanır ve kompartman numarası seçilir. “Hemen Başlat” butonuna tıklanır ve test çalışmaya başlanır.
  - 3.5.** Cihazın çalışması bittiğinde sonuçlar otomatik olarak bilgisayar üzerinden sonuç sistemine aktarılır. Sonuçlar hasta barkod numarasına göre kontrol edilir. Tekrar gerektiren test varsa tekrarı aynı şekilde ya da dilüsyon gerekiyorsa dilüe edilerek tekrar çalışılır.
  - 3.6.** Cihazın işi bittiğinde önce bilgisayar programı ve bilgisayar kapatılır, ardından cihaz arkasındaki ON/OFF tuşundan kapatılır.