



Doküman No: LAB-GT02

Yürürlük Tarihi: 4.7.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 17.11.2014

MINI-VIDAS CİHAZI KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
05.10.2005	Yönetim Değişikliği	1
17.11.2014	Yapıldı	2
	Yönetim Değişikliği	
	Yapıldı	

HAZIRLAYAN: Meral CENGİZ

Teknisyen

İMZA

ONAYLAYAN: Nusret TAHERİ

Başhekim

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: LAB-GT02

Yürürlük Tarihi: 4.7.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 17.11.2014

MINI-VIDAS CİHAZI KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ: Mini Vidas cihazını doğru bir şekilde kullanmak.

2. KAPSAM: Bütün laboratuvar çalışanlarını kapsar.

3. UYGULAMA:

3.1. Cihaz arkasındaki sol alt düğmeden açılmaktadır.

3.2. Çalışılacak kitler oda sıcaklığına getirilir.

3.3. A veya B section larından (available) müsait olana girilir

A:	AVAILABLE
B:	AVAILABLE

3.4. Kompartmanı seçtikten sonra şu ekran gelir.

Section A

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-

START

Buradaki numaralar strip pozisyonlarına karşılık gelmektedir. Strip koymak istenen numaraya basılır.

3.5. 1'e basıldıktan sonra şuekran gelir.

Section A

S
C
CLEAR
SELECT ASSAY
SAMPLE ID

3.6. {Select Assay} (test seçimi) opsiyonu seçilir. Test kodları görünür. Buradan çalışılacak test seçilir.

Testin tam karşısındaki düğmeye basılarak ilerlenir.



Doküman No: LAB-GT02

Yürürlük Tarihi: 4.7.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 17.11.2014

MINI-VIDAS CİHAZI KULLANIM TALİMATI

3.7. Eğer test ilk kez çalışılacak ise kutu içinde bulunan (master lot) kartı okutulur.

3.8. Okutma işlemini Ana menüden master lot menüye girilerek yapılır.

READ MASTER LOT
MANUEL MASTER LOT ENTRY
MANUEL TOS SHEAT ENTRY
LİST STORED
LİST MASTER LOT'S

3.9. Master lot menüden ise read master lot menüye girilir.

3.10. Ordan ise hangi kompartman boş ise onda okutulur okutma için cihazın altında bulunan master lot okutma kartı ile kartın üzerindeki ok işareti yönün de kart takılır ve okutma yapılır.

3.11. Daha sonra standart çalışılması gerekmektedir. (S) opsiyonu seçilir. Ekranı şu mesaj gelir. Enter standart number (1-9) kitte bulunan standart adedi girilir. Standart 1 tane ise 1 girilir.

3.12. Kontrol çalışılacak ise (c) opsiyonu ekrana şu mesaj gelir. Enter standart number (1-9) kitte bulunan kontrol adedi sıra ile girilir.

3.13. Sample ID (hasta kimliği) opsiyonu seçilir ve hasta ismi veya verilen numara girilir. Numaralar cihazın üzerinden seçilir daha sonra onaylanır.

3.14. Kompartman kapağı açılarak stripi ucundan tutularak ilgili yuvaya tamamen yerine oturduğunu hissedene kadar itilir ve ilk kuyucuğa gerekli miktarda sırası ile kontroller standartlar ve hasta serumları pipetlenir.

3.15. SPR kompartmanı açılır (üst kapağı) SPR lerin reaktif striplerinin üstündeki yuvalarına yerleştirilir.

3.16. Kullanılan stripler ve SPR ler aynı olmak zorundadır.

3.17. Kapaklar sıkıca kapatılıp start tuşuna basılır.

NOT: Standartlar 15 günde bir yeniden tekrarlanır. Master lot kartı okutmaya gerek yoktur. Standart tarihi bitmeden standart okutulmaz.