



Doküman No: LAB-GT03

Yürürlük Tarihi: 4.7.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 12.01.2012

MIKRO ELIZA CİHAZI KULLANIM TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
05.10.2005	İçerik Değişikliği	1
12.12.2012	Yapıldı	2
	İçerik Değişikliği yapıldı	

HAZIRLAYAN: Sevil ERKUT

Kimyager

İMZA

ONAYLAYAN: Nusret TAHERİ

Mikrobiyoloji Uzmanı



Doküman No: LAB-GT03

Yürürlük Tarihi: 4.7.2000

Değişiklik No: 2

Değişiklik Tarihi: 12.01.2012

MIKRO ELIZA CİHAZI KULLANIM TALİMATI

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA

- 1. AMAÇ:** Mikro ElizeChorus marka cihazını doğru bir şekilde kullanmak.
- 2. KAPSAM:** Tüm Laboratuvar çalışanlarını kapsar.
- 3. UYGULAMA:**
 - 3.1. OKUYUCU**
 - 3.1.1.** Cihaz sağ arka tarafta bulunan açma/Kapama düğmesinden açılır.
 - 3.1.2.** Cihaz açıldıktan sonra kendi içinde sistem check yapar.
 - 3.1.3.** Başlangıç ekranında cihazın tüm başlangıç kontrol işlemleri ve diğer fonksiyonel işlemlere giriş bölümleri yer alır.
 - 3.1.4.** Çalışmaya başlamadan önce hergün "Check" bölümünden "Restore" tuşuna basılarak cihazın gerekli yıkamaları yaptırılır.
 - 3.1.5.** Hasta stripleri sırası ile cihazın içindeki tepsiye yerleştirildikten sonra R-list yazılı butona basılır.
 - 3.1.6.** Ekranda yeni bir pencere açılır. Dahili barkodla striplerin tanımlanmasının istenilip istenilmediği sorulur. Evet dedikten sonra dahili barkod tepsideki 30 bölmeyi tarar ve bölmelerde bulunan kitlerin isimleri sırayla ekranda görülür.
 - 3.1.7.** Harici barkodla hasta numuneleri okutulur. Hepsi bittikten sonra "Run" a basılır.
 - 3.1.8.** Çalışma bittikten sonra hasta stripleri cihazdan çıkartılarak cihaza yıkama verilir.
 - 3.1.9.** Cihaz "Ready" konuma geldiğinde sağ arkada bulunan açma/kapama düğmesinden kapatılır.