



Doküman No: LAB-GT07

Yürürlük Tarihi: 04.07.2000

Değişiklik No: 3

Değişiklik Tarihi: 17.11.2014

## SEDİMENTASYON CİHAZI KULLANIM TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
04.03.2004	İçerik Değişikliği Yapıldı	1
05.10.2005	Yönetim Değişikliği Yapıldı	2
17.11.2014	İçerik Değişikliği Yapıldı	3

HAZIRLAYAN: Sevil ERKUT

Kimyager

İMZA

ONAYLAYAN: Nusret TAHERİ

Başhekim

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi



Doküman No: LAB-GT07

Yürürlük Tarihi: 04.07.2000

Değişiklik No: 3

Değişiklik Tarihi: 17.11.2014

## SEDİMENTASYON CİHAZI KULLANIM TALİMATI

### İMZA

- 1. AMAÇ:** Sedimentasyon cihazını doğru bir şekilde kullanmak.
- 2. KAPSAM:** Tüm laboratuvar çalışanlarını kapsar.
- 3. UYGULAMA:**
  - 3.1.**Cihazı, açma-kapama düğmesinden açınız.
  - 3.2.**Cihaz tarih ve saat belirten ekran çıkınca kullanıma hazırdır.
  - 3.3.** Alınan sedim kanları önce sedimentasyon devir cihazında 10 dk çevirilir.
  - 3.4.**Sedim tüpü üzerindeki hasta isimleri sedimentasyon kayıt defterine kaydedilir.
  - 3.5.**Tüpü devir cihazından alındıktan sonra barkod numarasını elle girerek "DEL" tuşuna basılır. Tüp cihaza yerleştirilir.
  - 3.6.**Tüpler yerleştirildikten 20-25 dk. Sonra sonuçlar host yoluyla sisteme gider.
  - 3.7.** Çıkan sonuç sedimentasyon kayıt defterine de kaydedilir.