



Doküman No: LAB-GT08

Yürürlük Tarihi: 4.7.2000

Değişiklik No: 3

Değişiklik Tarihi: 17.11.2014

## TAM İDRAR ANALİZ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
05.10.2005	Yönetim Değişikliği Yapıldı	1
22.02.2006	İçerik ve isim değişikliği	2
17.11.2014	Yapıldı İçerik Değişikliği Yapıldı	3

HAZIRLAYAN: Mehtap ERDEM

Biyolog

İMZA

ONAYLAYAN: Nusret TAHERİ

Başhekim

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi



Doküman No: LAB-GT08

Yürürlük Tarihi: 4.7.2000

Değişiklik No: 3

Değişiklik Tarihi: 17.11.2014

## TAM İDRAR ANALİZ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

### İMZA

**1. AMAÇ:** Tam İdrar Analiz Cihazını doğru bir şekilde kullanmak

**2. KAPSAM:** Tüm laboratuvar çalışanlarını kapsar.

### **3. UYGULAMA:**

**3.1.** Her sabah birgün öncesinin hasta sıra numaraları hem idrar analiz cihazında hem de bilgisayardaki otomasyon programında sıfırlanır. Numuneler her sabah 1. Sıra numarası ile başlar.

**3.2.** Hasta tarafından getirilen barkodlu idrar numunesi laboratuvar teknisyeni tarafından, cihazın belirlediği numara sırasına göre bilgisayarda otomasyon programına kaydedilir.

**3.3.** Ana menüde 1 tuşuna basınca algılayıcı,stripi algılamaya hazır hale gelir."Place Test Strip"(Test stripini yerleştirin) mesajı LCD ekranda yanıp sönmeye başlar.

**3.4.** Stripi idrar örneğine batırılır ve fazla idrar kağıt mendille emdirilerek alınır.

**3.5.** Sonra strip klavuz tablasına konur.Strip konulunca sensör ,yeşil ışık ile stripi algılar.

**3.6.** Cihaz ilk stripi otomatik olarak doğru pozisyona getirir ;sonra bir sinyal tonu ile cihazın içine çeker.Analiz yapılması için bütün bunlar 100 sn içinde olur.

**3.7.** Konulan stipin numarası LCD ekranın aşağı sağ tarafında görünür ve sürekli hareket eden (\*)'lar ile belirtilir.

**3.8.** Eğer kayıtlı ID varsa ve dahili yazıcı (ON) ise "ID for measuring" (Ölçüm ID numaraları) yazıcıdan çıkar.

**3.9.** Yazıcıdan çıkan ölçüm değerleri aynı anda bilgisayarda otomasyon sistemine aktarılır.

**NOT:** Cihaz her ayın başında bir kere kalibre edilir.